

Gebruikers handleiding Rebacare Free Ear.

U gebruikt het Rebacare Free Ear oorkussen bij decubitus aan het oor en komt in plaats van het reguliere hoofdkussen. Het kussen wordt niet bevestigd maar ligt los op het bed. De uitsparing van het kussen moet in de richting van het gezicht geplaatst worden zodat het smalle deel van het kussen tussen de schouders en hoofd geplaatst kan worden. Op deze wijze ligt het oor in de uitsparing van het kussen. Bij het aanpassen van de wisselhouding dient ook het kussen worden meegedraaid. Het kussen kan voor meerdere problemen aan het hoofd worden ingezet. Decocare is niet verantwoordelijk voor verkeerde inzet van het oorkussen. Wij adviseren om met uw ergotherapeut andere houdingen te bespreken. Zij zijn gespecialiseerd in verschillende lighoudingen.

In verband met stikgevaar bij een insult is het kussen niet geschikt voor mensen met epilepsie.

De hoes van het Rebacare Free Ear kussen kan gewassen worden bij 60 graden. De hoes mag niet in de droger. Het kussen is geproduceerd met een comfortabele PU (polyurethaan). Deze PU kan huishoudelijk worden schoongemaakt, wilt u het kussen desinfecteren dan kan dat met alcohol (90%) of speciale reinigingsdoekjes. Hier adviseren wij de Detergent Active reinigingsdoekjes.

Om het oor goed vrij te kunnen leggen moet de hoes van het kussen strak rond het kussen worden gespannen. Bij het verschonen of verwisselen van de hoes adviseren wij om de hoes binnenstebuiten te draaien en op die manier de hoes over het kussen te schuiven.

Tip:

Wij adviseren om indien mogelijk de cliënt elke 3 uur wisselhouding aan te bieden. Op deze manier kunnen pijnklachten en decubitus worden voorkomen.

